

Descrizione del software Mimics

Materialise's **I**nteractive **M**edical **I**mage **C**ontrol **S**ystem (MIMICS, sistema interattivo di controllo di immagini mediche) è uno strumento software di visualizzazione e segmentazione di immagini mediche (come CT e MRI) e rendering di oggetti 3D. Il software è disponibile in due versioni: Research e Medical. Solo la versione Medical può essere utilizzata come dispositivo medicale, entro i limiti descritti nella dichiarazione delle condizioni d'utilizzo di questa versione. La versione Research è destinata esclusivamente alla ricerca.

Mimics può essere utilizzato per caricare ed elaborare stack di immagini 2D da numerosi formati, compresi: Formato Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG e immagini in formato raw. Una volta elaborate le immagini, queste possono essere utilizzate per numerose applicazioni di "Ingegneria sull'anatomia", comprese la misurazione, progettazione, modellazione e stampa 3D.

Mimics Base consente agli utenti di controllare e correggere la segmentazione di immagini mediche quali scansioni CT e MRI. Un utente in possesso di adeguata formazione per il software può facilmente definire accurati modelli 3D per la visualizzazione e/o produzione. Il software fornisce inoltre una modalità di rimozione degli artefatti che possono apparire nelle immagini a causa di impianti metallici del paziente.

Moduli supplementari offrono ulteriori funzionalità, come la possibilità di eseguire operazioni CAD (per la progettazione di protesi paziente specifico o l'ottimizzazione di nuovi dispositivi basandosi su informazioni ottenute da immagini) o preparare mesh di elementi finiti. Materialise sviluppa inoltre un software per la fase di fabbricazione, ideale per la preparazione di modelli o dispositivi medicali per qualunque sistema di stampa 3D. Contattateci per maggiori informazioni.

Indicazioni per l'uso

Mimics Medical (di seguito 'Mimics') è destinato all'impiego come software di interfaccia e sistema di segmentazione di immagini per il trasferimento di informazioni estrapolate da immagini ottenute con uno scanner medicale, come uno scanner CT o uno scanner di imaging a risonanza magnetica, ad un file di uscita. Viene inoltre utilizzato come software preoperatorio per la simulazione/valutazione delle opzioni di trattamento chirurgico.

Mimics non è destinato all'impiego per imaging mammografico.

Controindicazioni

Notare che Mimics non è destinato all'impiego per imaging mammografico.

Avvertenze e raccomandazioni

Il software Mimics deve essere utilizzato esclusivamente da professionisti qualificati. Per risultati ottimali si consiglia a tutti gli utenti la partecipazione ad un corso di formazione tenuto da un esperto Materialise. I prodotti destinati al trattamento o alla diagnosi di pazienti devono essere controllati da il medico responsabile, il quale può in grado di confrontare le ricostruzioni 3D con le immagini per verificarne la qualità. Costituisce obbligo ultimo del medico responsabile esercitare il proprio giudizio professionale per stabilire se il trattamento pianificato mediante il software per dispositivi medicali (Mimics) debba essere eseguito. La distanza inter-scansione e intra-scansione inferiore a 1 mm è consigliata nel caso in cui si decida di basare la decisione di trattamento su ricostruzioni 3D per la pianificazione preoperatoria o su stampe. Per applicazioni ossee si consiglia di ricostruire le immagini mediche in una finestra ottimizzata per la parte ossea.

Consigli di buona pratica e precauzioni

Tenere presente che la qualità delle immagini mediche determina il grado di precisione del modello 3D in Mimics. La scelta dei protocolli di scansione è a discrezione dell'utente, tuttavia si consiglia di fare riferimento e ottemperare agli standard del settore. Per la simulazione e/o valutazione di opzioni di trattamento chirurgico devono essere utilizzate immagini ottenute meno di sei mesi prima.

Tenere presente che il sistema di coordinate Dicom viene resettato per ciascuna serie Dicom derivante da tutti gli scanner Hitachi e dagli scanner Siemens Symphony, Sonata e Harmony con versioni software precedenti a Syngo MR B13.

Istruzioni d'uso

Avvio di Mimics

Dopo avere installato il software sul PC, fare doppio clic sull'icona di Mimics, **Research** o **Medical** presente sul desktop. Per iniziare è anche possibile fare clic sul pulsante **Start** → **All Programs** → **Materialise** → **Mimics**. Assicurarsi di selezionare l'edizione Medical per le applicazioni cliniche.

Il software Materialise è protetto da un file chiave. Quando Mimics viene avviato per la prima volta, o una volta scaduta la chiave, il Key Request Wizard (procedura guidata di richiesta chiave) viene automaticamente avviato per assistere l'utente nella procedura di registrazione. Le opzioni disponibili sono illustrate nella **Guida di riferimento**. Si consiglia di selezionare **'instant activation'** (attivazione istantanea) nel Key Request Wizard. In questo modo, se si dispone di accesso ad Internet la chiave verrà rinnovata automaticamente alla scadenza.*

Requisiti minimi di sistema**

- Windows XP (per la versione Mimics 64 bit è necessaria l'edizione x64)
- 2 GB di RAM
- 2 GB di spazio disponibile su hard drive
- Scheda grafica con 256 MB di RAM
- DirectX 9.0

Requisiti di sistema consigliati

- Windows 7 versione x64
- 4 GB di RAM
- 8 GB di spazio libero su hard disk
- Scheda grafica in grado di supportare 512 MB di RAM
- DirectX 9.0 o versione superiore

*Potrebbero essere necessari altri requisiti.

**Per l'utilizzo di set di dati di dimensioni superiori a 1 GB, il sistema dovrebbe essere conforme ai requisiti di sistema consigliati. Strumenti di segmentazione avanzata come Smart Expand e Coronary Segmentation richiedono l'hardware specificato nei requisiti consigliati anche per set di dati di minori dimensioni.

Dettagli di contatto produttore

Data di produzione: Aprile 2014

Web: <http://biomedical.materialise.com>

www.materialise.com

Materialise NV – Technologielaan 15, B-3001 Leuven, Belgio
mimics@materialise.be

L-10082-02



Mimics[®]

Edizione Medical
Istruzioni d'uso del software

*Il presente documento contiene le "Istruzioni d'uso" di base del software Mimics.
Istruzioni dettagliate sono disponibili nella "Guida di riferimento".
La lingua utilizzata per l'interfaccia del software Mimics è l'inglese.*

Materialise NV

Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgio
Telefono: +32 16 39 66 11

CE 1639 Mimics Medical è un prodotto a marchio CE.